



Lernen Sie die Bedürfnisse Ihres Hundes kennen

BITTE FÜLLEN SIE DEN FRAGEBOGEN LESERLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUS!

Vergessen Sie nicht Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, an die wir den Link mit dem Ergebnis senden.

NUR WENN SIE IHRE E-MAIL-ADRESSE ANGEGEBEN HABEN, können wir Sie über die Möglichkeit, das Ergebnis aufzurufen, informieren.

DAS ERGEBNIS WIRD IM PETS DIAG-KUNDENKONTO VERFÜGBAR SEIN. Wenn Sie darauf zugreifen möchten, registrieren Sie sich unter www.petsdiag.com mit der unten angegebenen E-Mail-Adresse.

E-Mail-Adresse für den Versand des EHAA-Ergebnisses

ANGABEN ZUM TIER:

NAME

GEWICHT ALTER

RASSE

GESCHLECHT weiblich männlich

Pets Diag S.A. mit Sitz in Lubiny 10C, 40-582 Katowice, E-Mail-Adresse: office@petsdiag.com, als Administrator der personenbezogenen Daten, informiert Sie, dass:

die Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 geschützt werden; die bereitgestellten Daten werden auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b verarbeitet, um den abgeschlossenen Vertrag über die Durchführung der EHAA-Untersuchung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO zu erfüllen, um die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, die dem Administrator auf der Grundlage der allgemein geltenden Gesetze, einschließlich Steuer- und Buchhaltungsvorschriften, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f zum Zwecke der möglichen Feststellung obliegen, Verfolgung oder Verteidigung von Ansprüchen im Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Vertrag; Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, aber für die Durchführung der EHAA-Untersuchung erforderlich. Sie haben das Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen und die Verarbeitung zu berichtigen, zu löschen, die Verarbeitung einzuschränken, das Recht auf Datenübertragbarkeit; den Datenschutzbeauftragten unter iod@petsdiag.com kontaktieren; personenbezogene Daten werden für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum der Untersuchung oder der letzten Aktivität im Pets Diag Dashboard gespeichert oder der Zeitraum verlängert sich im Falle der Begründung, Verfolgung oder Verteidigung von Ansprüchen in Übereinstimmung mit dem Gesetz; Ihre Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, auch nicht in Form von Profiling; Die Daten können an Stellen übermittelt werden, die aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung autorisiert sind, oder an diejenigen, mit denen der Administrator Betrauungsverbindungen abgeschlossen hat; wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde gegen deren Verarbeitung beim Vorsitzenden des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten mit Sitz in Warschau in der Stawki 2 Straße einzureichen; Eine Übermittlung der Daten an Drittländer findet nicht statt.


JAK POBRAĆ PRÓBKĘ

Unmittelbar vor der Entnahme der Probe sollte das Fell nicht gewaschen, sondern nur gründlich von Verunreinigungen ausgekämmt sein (der Hund sollte vor mindestens 3 Tagen gebadet sein).

Entnehmen Sie eine Probe aus dem Schulter- oder Leistenbereich. Nehmen Sie die erste Strähne heraus und schneiden Sie sie mit einer scharfen Schere an der Haut ab. Für die Untersuchung benötigen wir eine 1,5-2 cm lange Strähne von der Schnittstelle (von der Haut) gemessen. Den Rest der Strähne können Sie wegwerfen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis das abgeschnittene Fell ein Gewicht von 300-400 mg beträgt. Nutzen Sie dazu die beigegefügte Waage.

Wenn Sie einen kurzhaarigen Hund mit glattem Fell haben, verwenden Sie für die Probenahme ein Rasierapparat. Die für die Untersuchung erforderliche Menge und Ort der Probenahme bleiben gleich.

Um bestimmte Trends genau zu bestimmen, wiederholen Sie diese Untersuchung alle 6 Monate.

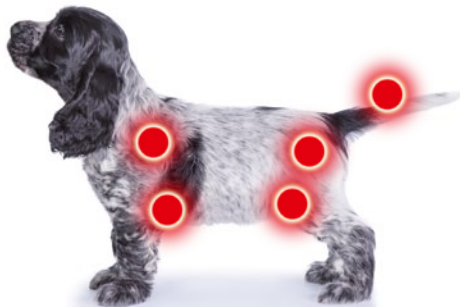

Ergebnis abrufbereit - einfach von zuhause!

Senden Sie das ausgefüllte Formular zusammen mit der Probe im beigefügten Rückumschlag an unser Labor. Die Wartezeit auf das Ergebnis mit seiner Interpretation beträgt bis zu 14 Werktage. Wir werden Sie per E-Mail informieren, sobald die Auswertung vorliegt.

Już teraz zarejestruj się na www.petsdiag.com

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1** Klicken Sie auf **Registrieren** und geben Sie dann Ihr Login Daten ein (dies ist die E-Mail-Adresse, die Sie in dieser Anamnese angegeben haben).
- 2** Geben Sie ein beliebiges Passwort ein und klicken Sie auf **Registrieren**.
- 3** Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie auf den Link, geben Sie Ihre Daten in das Anmeldefenster ein und wählen Sie dann **Anmelden**. Sie können nun das Profil Ihres Hund zu Ihrem Kundenkonto hinzufügen.

