

Anleitung zur Probennahme

Stuhltests

Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 1 Probengefäß inkl. Etikett in Versandgefäß
- 1 Stuhlfänger
- 1 blaue Versandtasche

Diese Anleitung ist gültig für folgende Tests:

*Darmcheck Kinder
Darmpolypen Vorsorge
Darmpolypen Vorsorgetest plus
Florastatus
Gesundheitscheck Darm
Gluten
Helicobacter pylori
Parasiten
Pilz Stuhltest
Viscera Stuhltest*

Test-Vorbereitung

Flachspül-Toilette:

„Deo-Mittel“ entfernen, nachspülen, Stuhl nicht mit Urin vermengen

Tiefspül-Toilette:

beiliegenden „Stuhlfänger“ (Patientenhilfe für die Entnahme der Stuhlprobe) benutzen

Test-Durchführung

1. Benutzen Sie den Entnahmelöffel aus dem Probengefäß, um Proben an drei verschiedenen Stellen des Stuhls zu entnehmen.
2. Füllen Sie diese in das Probengefäß bis zur markierten Füllhöhe (½ Röhrchen).
3. Verschließen Sie das Gefäß gut.
4. Beschriften Sie das Gefäß mit Namen und Probendatum und kleben Sie ein Barcode-Etikett vom Probenbegleitschein auf das Gefäß.
5. Stecken Sie dieses in das Versandgefäß.
6. Legen Sie dieses zusammen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die blaue Versandtasche.

Probe ggf. bis zum Versand im **Kühlschrank** aufbewahren, jedoch nicht einfrieren!

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Bitte werfen Sie die Probe bei extremer Hitze oder Frost nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe am Postschalter ab.

**Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr medivere-Team**



*medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz*

*Telefon: 0900-54 75 266**

**0,85 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; die Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.*