

Anleitung zur Probennahme

Stuhltest Darm-Mikrobiom (Plus)

Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist.
Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 1 Stuhlprobenröhrchen mit Etikett in Versandgefäß
- 1 Mikrobiom-Probenröhrchen mit Etikett in Versandgefäß
Achtung! Der Stabilisator ist reizend! Bitte nicht ausschütten!
Bitte nicht mit den Schleimhäuten in Berührung bringen!
- 1 Stuhlfänger
- 1 Versandgefäß
- 1 blaue Versandtasche



Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.
Bitte werfen Sie die Probe bei extremer Hitze oder Frost nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe am Postschalter ab.

Test-Vorbereitung

Flachspül-Toilette:

„Deo-Mittel“ entfernen, nachspülen, Stuhl nicht mit Urin vermengen

Tiefspül-Toilette:

beiliegenden „Stuhlfänger“ (Patientenhilfe für die Entnahme der Stuhlprobe) benutzen

Gewinnung der Stuhlproben

A. mittels Stuhlprobenröhrchen im Versandgefäß

1. Benutzen Sie den Entnahmelöffel aus dem Probengefäß, um Proben an drei verschiedenen Stellen des Stuhls zu entnehmen.
2. Füllen Sie diese in das Probengefäß bis zur markierten Füllhöhe ($\frac{1}{2}$ Röhrchen).
3. Verschließen Sie das Gefäß gut.
4. Beschriften Sie das Gefäß mit Namen und Probandatum.

