



MINERAL-CHECK

ANLEITUNG

PROBENENTNAHME von HUNDEHAAR

Schritt 1

Waschen Sie vor dem Schneiden die Haare ihres Hundes mit einem neutralen Shampoo. Spülen Sie das Haar gut aus und trocknen sie es sorgfältig. Verwenden Sie bitte kein medizinisches Shampoo oder sonstige Tinkturen vor der Probennahme!

Schritt 2

Nehmen Sie die Proben in kleinen Portionen im Nacken- oder Halsbereich des Tieres. Achten Sie darauf, dass das Haar möglichst nahe an der Hautoberfläche mit einer sauberen Schere abgeschnitten wird. Langes Haar bitte vor der Probennahme auf eine verbleibende Länge von ca. 2 bis 3 cm kürzen. Es wird in etwa ein **gestrichener Esslöffel** Haar benötigt.

Schritt 3

Geben Sie das Haar in die beiliegende Papiertüte. Geben Sie diese in den an uns adressierten Freiumschlag.
